



PURE AESTHETICS



**TINTES FLUORESCENTES UNIVERSALES
DE PORCELANA LISTOS PARA USAR**



Visit www.shofu.com or call 800.827.4638



TINTES FLUORESCENTES UNIVERSALES PARA PORCELANA LISTOS PARA USAR



Tintes de porcelana Vintage Art, con una estructura de partículas micro-finas, exhiben propiedades de fácil aplicación y una cobertura extraordinaria.

Las características de coloración de dientes naturales y técnicas de reproducciones precisas han sido analizadas por tecnicos dentales mundialmente, basado en este conocimiento acumulado, el concepto de Vintage Art fue desarrollado. Le ofrece ilimitadas posibilidades para caracterizaciones internas y externas al igual que ajuste de color en restauraciones de porcelana.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Este distintivo tinte tiene un CTE independiente y puede ser aplicado en cualquier porcelana, así como para cualquier subestructura. La calidad fluorescente crea efectos internos y externos en cualquier cerámica desde alúmina hasta zirconia o porcelana para metal. Una amplia investigación ha dado lugar en un tinte que se pueda aplicar directamente a cualquier subestructura para obtener efectos tri-dimensionales que parecen provenir dentro de los dientes naturales causando el mismo efecto en restauraciones.

Los odontólogos valorarán lo fácil de usar el esmalte y la estética natural obtenida en cualquier restauración generada por CAD / CAM. Fácil manejo de los colores Vintage Art debido a la consistencia de las pastas, le permite a el odontólogo la libertad de personalizar las restauraciones y crear valor adicional para cualquier restauración creada por un CAD / CAM personal. Los colores A, B, C y D hacen que sea fácil ajustar cualquier porcelana hacia el tono correcto.

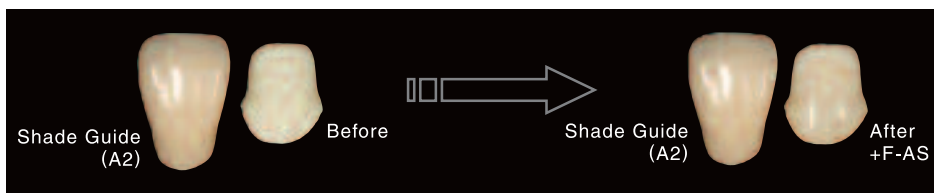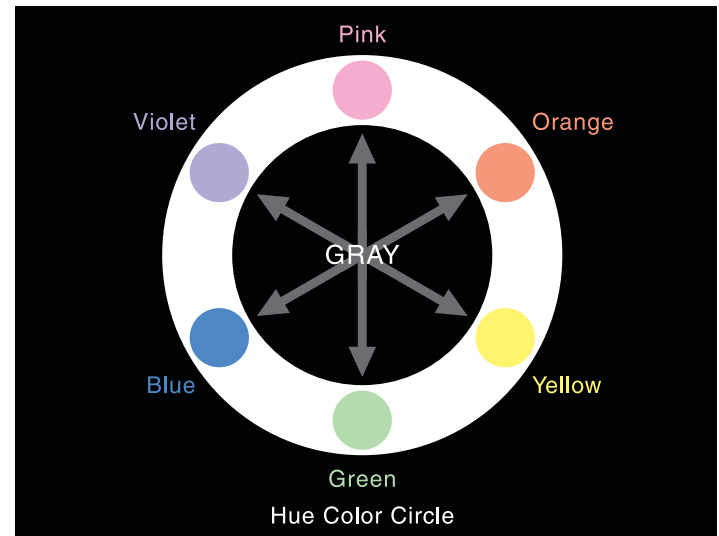

Fundación de tonos de tintes: ajuste de tonos para estructuras de cerámica

Firing Schedule

● Inner Porcelain Stain

600°C (Drying time: 5~7 min.)
Firing in the air
Heat rate: 50~60°C/min.

830~850°C

● Outer Porcelain Stain

600°C (Drying time: 5~7 min.)
Firing in the air
Heat rate: 50~60°C/min.

850~870°C

ESTÉTICA NATURAL

El concepto estético de tintes Vintage Art incluye los colores primarios como el amarillo Y el azul, así como numerosos colores intermedios pre mezclados que se pueden elegir dependiendo de las características de el color natural. Ofrecen una variedad de opciones para la coloración natural o para correcciones necesarias de restauraciones de porcelana. El valor puede ser incrementado o disminuido agregandole una cantidad relativa de los colores con valor. Cinco colores marrones diferentes son disponibles para la creación de acentos prominentes en las áreas incisales o cervicales. Por la acentuación natural de los efectos , las restauraciones de porcelana coinciden con los dientes naturales adyacentes, incluso con mayor perfección.



Corona de cerámica después de prensado



Después del ajuste de color



Dientes artificiales de porcelana



Después del contorno y ajuste de color

VINTAGE ART – DISEÑADO PARA SER LIBRE DE PREOCUPACIONES!

-  altamente fluorescentes, tintes para porcelana listos para usar para las técnicas de aplicación internas y externas
-  excelente aplicación y excelentes características de cobertura debido a las estructuras de partículas ultra-finas
-  aplicaciones específicas de los acentos de colores prominentes en el laboratorio y en la práctica odontológica
-  fundación de color para todas las estructuras de cerámica o tintes opacos con fundación de fluorescencia
-  simple técnica de aplicación de tintes para cerámica prensada o piezas fabricadas por CAD / CAM de cerámica en grupos de colores A, B, C, D y R (Ajuste Rojo)
-  maquillaje estético y glazeado para material de prensado de metal y zirconia (por ejemplo, Shofu Vintage prensado y ZR prensado)
-  lógicamente estructurado con el concepto de color :
Fundación de tonos de tintes, colores de tintes con estética
-  rango de cocción de temperatura desde 830°C (tintes internos) a 920°C



SHOFU



CERAMICS

Concedido, desarrollado y fabricado exclusivamente por Shofu, los fabricantes de porcelana dental fina desde 1922.

VINTAGE ART



BASIC COLOR SET (PN 6510)

17 colores (3g): GP, P, Y, BI, O, V, Gr, B, W, DR-Br, O-Br, K, AS, BS, CS, DS, RS
Vintage Art Stain Liquid (50mL)



RELLENO 3G



EFFECT COLOR SET (PN 6511)

16 colores (3g): GP, G, BI-G, CY, Br, B-Br, MP, Mlv, RP, WR, P-O, F-AS, F-BS, F-CS, F-DS, F-RS
Vintage Art Stain Liquid (50mL)



PORCELAIN BRUSH SET (PN 6985)

6 pinceles: OP-0, S-0, S-1, P-3, P-5, P-7



ZR PRESS OVER INTRO KIT (PN 8969)

6 tonos (2g x 5 gránulos): A1, A2, B1, W1, W3, N
5 Vintage Art (3g): GP, W, G, Y, BI
CoreMaster: KN7, WH6



PRESS OVER KIT (PN 6080)

6 tonos (2g x 5 gránulos): A1, A2, B1, W1, W3, N
5 Vintage Halo Paste Opaques (8g): W1O, W3O, A1, A2, B1

VINTAGE ART : COLORS AND USAGE

BASIC COLORS

COLOR	IMAGE	SHADE ADJUSTMENT	CERVICAL	STAIN	INCISAL	GUM
Pink*1						
Yellow*1						
Blue*1						
Orange*1						
Violet*1						
Green*1						
Black						
White						
Dark Red Brown						
Orange Brown						
Khaki						
A shade*2						
B shade*2						
C shade*2						
D shade*2						
R shade*2						

EFFECT COLORS

COLOR	IMAGE	SHADE ADJUSTMENT	CERVICAL	STAIN	INCISAL	GUM
Gray						
Blue Gray						
Corn Yellow						
Brown						
Black Brown						
Mamelon Pink						
Mamelon Ivory						
Rose Pink						
Wine Red						
Pink Orange						
F-A shade*2						
F-B shade*2						
F-C shade*2						
F-D shade*2						
F-R shade*2						

*1 Base Stains

*2 Shade Stains



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan (www.shofu.co.jp)

SHOFU INC. Singapore Branch 10 Science Park Road, #03-12 The Alpha, Science Park II, Singapore 117684 (www.shofu.com.sg)

SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China (www.shofu.com.cn)

SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059, USA (www.shofu.com)

SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK (www.shofu.co.uk)

SHOFU DENTAL GmbH Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany (www.shofu.de)

SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.
© Copyright 2012 SHOFU INC. All rights reserved.